

Návod k použití, údržbě, montáži

MULTIflex rychlospojka 460 E


Objednáací číslo 1001.7600

Vážená paní doktorko,
vážený pane doktore,

KaVo Vám přeje s Vaším novým kvalitním produktem

MULTIflex rychlospojkou 460 E

mnoho spokojenosti. Proto, abyste s tímto produktem mohli klidně, hospodárně a jistě pracovat, přečtete si prosím pozorně tento návod k použití.

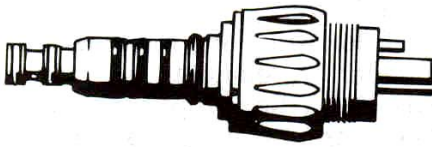

Technické údaje

MULTIflex rychlospojka 460 E

Čtyřdířové připojení s kontaktním dílem.
Obsahuje retrakční ventil.

Důležitá upozornění

MULTIflex rychlospojka je

- určena jen pro zubolékařské ošetřování v oblasti dentálního lékařství, každé jiné použití je nepřipustné a může vést k ohrožení
- lékařský produkt, který odpovídá příslušným zákonným ustanovením.




MULTIflex rychlospojka může být používána za předpokladu dodržení

- platných pracovních-ochranných ustanovení
- platných opatření k zabránění úrazu
- a tohoto návodu na použití.


Na základě těchto ustanovení je uživatel povinen

- používat doporučené pracovní prostředky
- používat produkt jen k předepsaným výkonům
- chránit sebe, pacienta i třetí osobu od možného ohrožení
- zabránit jakékoliv kontaminaci tímto produktem.

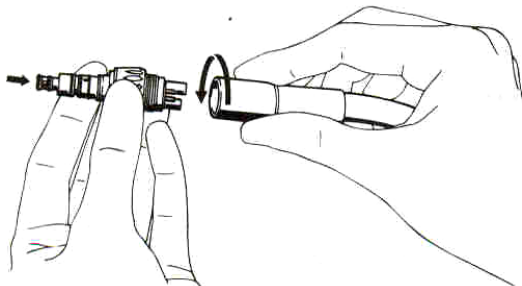

Uvedení do provozu


Připojení na přístroje

 **Je nutné zabezpečit suchý a čistý tlak. vzduch.**

Multiflex rychlospojku našroubovat na turbínovou hadici a klíčem pevně dotáhnout.

Všechny O-kroužky lehce namažte KaVo sprejem nebo KaVo silikonem. Rychlospojka musí zůstat našroubovaná na hadici. K eventuálnímu sejmutí použijte opět klíč.


 **Na prstenec příliš netlačte, mohlo by dojít k poruše funkce.**

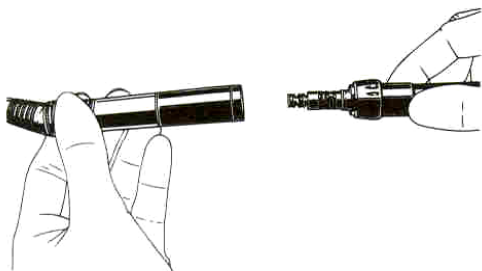

Výměna instrumentu

Nasaditelné jsou všechny KaVo instrumenty s originálním MULTIflex systémem připojení. Nasadíte instrument přímo na MULTIflex rychlospojku a zatlačíte oba díly k sobě až slyšitelně zacvaknou.

⚠ Pokud nedodržíte přímý směr nasazování nebo snímání, můžete tím snížit životnost žárovky.

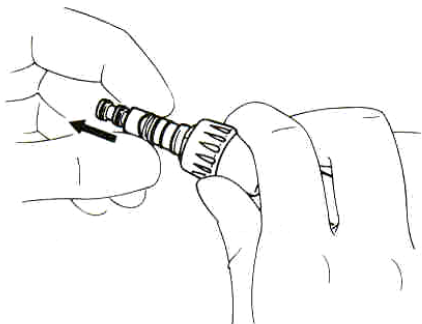

Výměna O-kroužků

Odstraněním a výměnou O-kroužků vyřešíte některé netěsnosti rychlospojky.

Vezměte do dvou prstů O-kroužky a vytvořte z nich smyčku.

Posunujte O-kroužky dopředu a sejměte je. Nasadíte nové O-kroužky a potřete je KaVo sprejem nebo KaVo silikonem.

⚠ Nepoužívejte vazelinu nebo jiné tuky.

Návod k ošetřování rychlospojky

Vnější čištění

MULTIflex rychlospojka se smí zvnějšku čistit alkohol. roztokem.

⚠ MULTIflex rychlospojka se nesmí čistit v ultrazvukovém desinfektoru, může to mít vliv na její další funkci.



Desinfekce

Zvnějšku lze MULTIflex rychlospojku dezinfikovat pomocí dezinf. prostředků (stříkaná, vtíraná dezinfekce). MULTIflex rychlospojka se nesmí vkládat do desinfekční lázně může to mít vliv na její další funkci.

⚠ MULTIflex rychlospojka se nesmí sterilizovat.



Příslušenství

Dodávané obchodními zástupci firmy KaVo

Označení	Objednávací číslo
Klíč	0411.1563
Náhradní těsnění	0553.5262
O-kroužek	0200.6113
O-kroužek	0200.6037

Další upozornění

⚠ Před delší dobou nepoužívání musí být MULTIflex rychlospojka podle návodu ošetřena, vyčištěna a v suchu uskladněna. Při poruše se nesmí MULTIflex rychlospojka dále používat.

Abyste se vyvarovali větších škod, obraťte se na KaVo Biberach, KaVo CZ zastoupení, na Vaše příslušné dentální depo nebo na od KaVo autorizované oprav. dílny.