

DEZINFEKČNÍ A ČISTICÍ PŘÍPRAVEK PRO MANUÁLNÍ REPROCESSING NÁSTROJŮ VE STOMATOLOGII

Sekudrill™

Dezinfekční a čistící přípravek pro péči o zdravotnické prostředky, zejména o stomatologické rotační instrumentárium z oceli a tvrdokovu

Sekudrill je dezinfekční a čistící přípravek, který se neředí a tím je připraven k okamžitému použití pro manuální reprocessing, případně pro použití v kombinaci s ultrazvukovou lázní.

Sekudrill nabízí:

- ▲ Rozsáhlé spektrum účinnosti
- ▲ Dobrou materiálovou kompatibilitu
- ▲ Produkt je připravený k okamžitému použití



Sekudrill™

Čezinfekční a čistící přípravek pro péči o zdravotnické prostředky, zejména o stomatologické rotační instrumentárium z oceli a tvrdokovu

Proč používat Sekudrill?

Sekudrill je účinný proti široké škále bakterií a kvasinek, je virucidní dle EN 14476 (viz tabulka).

SNADNÉ POUŽITÍ

Díky své formě připravené k okamžitému použití nabízí Sekudrill uživateli snadnou a bezpečnou manipulaci. Odměrka, která je součástí balení, zajišťuje při každé aplikaci snadné dávkování.

VÍCE MOŽNOSTÍ APLIKACE

Pro čistící dezinfekci lékařských, zejména rotačních nástrojů z oceli, tvrdokovu nebo s diamantovým hrotem.

Sekudrill je použitelný v lázni na vrtáčky a frézy i v ultrazvukové lázni.

Je vhodný pro nástroje odolné vůči vysoce alkalickým produktům.

Není kompatibilní s hliníkovými díly.



Sekudrill 2 l
láhev s rukojetí
a s odměrným
uzávěrem

ÚČINNOST	KONCENTRACE	DOBA PŮSOBNÍ
Dezinfekce nástrojů dle VAH (zkušební metoda DGHM, verze 2001), účinnost proti bakteriím a kvasinkám. Čistě i nečistě podmínky.	Neředěný	5 min
Virucidní dle EN 14476	Neředěný	15 min

ECOLAB
HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE
GMBH Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2001
www.ecolab.com

ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu

CE 0297

EFEKTIVNÍ PRAKTICKÝ ÚSPORNÝ

OBLASTI POUŽITÍ

Dezinfekční a čistící přípravek je určen pro péči o zdravotnické prostředky, zejména ve stomatologii. Doporučuje se pro ošetření rotačního instrumentária z oceli a tvrdokovu, diamantu, elastických leštících nástrojů, keramických brusných tělísek a kořenových nástrojů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Ihned po použití vložte předměty do neředěného roztoku. Dbejte na to, aby byly všechny dokonale smočené. Nástroje čistěte podle pokynů výrobce včetně mechanického působení (např. drhnutí kartáčkem, otírání) dokud nebudou vizuálně čisté. Po doporučené době působení je vyjměte, opláchněte vodou a osušte jednorázovou papírovou utěrkou. Je-li na nástroji dosud patrné znečištění, setřete ho a nástroj znovu vložte do roztoku. Na ocelové nástroje je před parní sterilizací nutno nastříkat ochranu proti korozi, nesmějí se sterilizovat v malých autoklávech.

SLOŽENÍ

100 g obsahuje následující účinné látky: 50 g propylenglykolu, 5 g hydroxidu draselného

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	MNOŽSTVÍ KUSŮ V KARTONU	OBJEDNACÍ KÓD
Sekudrill 2 l	4	3031080

Pouze pro profesionální použití.

2018 / 044 APPR. 2018.08.06.