



Incidin plus

Incidin plus

kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený dezinfekci povrchů a předmětů

Incidin plus je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

- účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a obaleným i neobaleným virům
 - neobsahuje aldehydy ani KAS, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem - glukoprotaminu
 - čistící účinek, svěží vůně - neobsahuje těkavé účinné složky
 - účinkuje v nízkých koncentracích
 - nepůsobí agresivně vůči čistěným materiálům
 - je vhodný jak pro ruční, tak pro strojové čištění a dezinfekci
 - je vhodný k dezinfekci a mytí podlah, ošetřených polymery- doložená kompatibilita
- Složení: antimikrobiální účinná látka, neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, látky ovlivňující rozpouštěcí schopnost a pěnovost, barvivo, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu plus: 26,0 g glukoprotaminu

Doporučené ředění při použití	koncentrace (%)	doba expozice
Účinnost proti bakteriím(včetně MRSA) a kvasinkám	0,25	15 min
Účinnost proti TBC	0,25 0,50 1,00	1 h 30 min 15 min
Účinnost proti ostatním mykobakteriím	0,5	15 min
Účinnost proti vaccinia a BVDV (účinnost proti obaleným živočišným virům HIV, HBV, HCV) dle DVV/RKI	0,25 0,50	30 min 15 min
Účinnost proti rotavirům	0,50	15 min
Účinnost proti herpesvirům	0,10	5 min
Účinnost proti jiným virům: Vaccina Adeno Papova	0,50 1,00 0,50	15 min 1 h 1 h

Oblast použití:

- veškerá zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, laboratoře
- výrobní konečných lékových forem, infuzních roztoků, čisté provozy výrobních podniků
- komunální hygiena, různá veřejná zařízení - hotely, lázně, sportovní zařízení, školy, provozovny kadeřnictví, pedikúry apod.

Pokyny pro použití:

- před použitím zředit na vhodnou koncentrací studenou pitnou vodou
- nepřidávat jiný čisticí ani dezinfekční prostředek
- plochy nebo předměty umýt a nechat uschnout, neutírat do sucha
- 10 litrů pracovního roztoku stačí na plochu 50 - 100 m² podle stupně znečištění
- použité mopy a hadry po ukončení práce vyprat (nejlépe v horké vodě) a vysušit
- uchovávat v původním obalu, při teplotách 0°C až +25 °C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace. Obaly je možno spalovat v zařízeních k tomu určených.
- vypláchnutý obal není nebezpečným odpadem.

Bezpečnostní pokyny:

- způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití
- při práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a při každé práci ochranné rukavice. Po práci se dobře umyjte a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda)
- uchovávejte mimo dosah dětí
- informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.

První pomoc:

Pokyny pro první pomoc a ochranných pomůckách jsou uvedeny na aktuálním bezpečnostním listu

Doba použitelnosti: 48 měsíců

Balení: 6 l PE kanystr

2 l PE láhev s integrovaným dávkovačem baleno v kartonu po 3 ks

Doba použitelnosti: 48 měsíců