



# ANIOSYME SYNERGY 5

Přípravek k enzymatickému čištění instrumentaria.  
5 enzymů v 1 unikátním produktu.  
Čistič a odmašťovač.  
Multi-aplikace - ruční a strojové mytí.  
V myčce účinný od 1 min.  
Účinný v jakékoliv kvalitě vody (změkčená, z vodovodní sítě,...).  
Bezpečný pro životní prostředí.  
Neutrální pH roztoku.

## INDIKACE

- Čištění chirurgických nástrojů a zdravotnických pomůcek.
- Ruční čištění namáčením.
- Čištění v ultrazvukových čističkách.
- Čištění v myčkách.
- 5 enzymů (amyláza, celulóza, lipáza, mannáza, a proteáza) zajišťuje široké spektrum účinnosti na složky všech druhů znečištění.

## CHARAKTERISTIKA

- Snižená pěnovost
- Viskozita produktu: 10 mPa.s

- Hustota: asi 1,115
- pH přípravku: asi 8
- pH roztoku: asi 7,25
- Testováno v souladu s dostupnými čistícími ukazateli:
  - o Čištěcí/dezinfekční plán na různé typy znečištění při namáčení (tuk a krev)
  - o Široké testování v myčkách
  - o ATPmetry
  - o Tzv. „German“ znečištění popsané normou EN 15883 v ultrazvukových lázních

## SLOŽENÍ

- enzymatický komplex (amyláza, celulóza, lipáza, mannáza, a proteáza), neionogenní a aniontové látky, sekvestrační činidlo, stabilizační činidlo, pomocné látky



# ANIOSYME SYNERGY 5

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Používejte roztok mezi 0,3% (ruční mytí) a 0,5% (strojové mytí).
- Přizpůsobte koncentraci, expoziční dobu a teplotu s ohledem na stupeň znečištění a používanou čisticí metodu.
- Mechanicky očistěte, pokud je potřeba.
- Důkladně opláchněte vodou.
- Maximální teplota je 60°C.

## TYP PŘÍPRAVKU

Zdravotnický prostředek tř. I

## BALENÍ

Aniosyme Synergy 5 Aniosyme  
Synergy 5

1 l (dávkovací láhev)  
5 l

12 ks/karton  
4 ks/ karton + 1x dávkovací pumpa 25 ml

## SKLADOVÁNÍ

+5°C až +35°C