

# schülke -†



Vysoce účinný koncentrovaný kapalný přípravek na bázi kombinace glutaraldehydu a kvarterních amoniových sloučenin pro dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch.

Plně virucidní

## antifect® extra

### Naše Plus

- Příjemná vůně
- Výborné čisticí vlastnosti
- Krátká doba expozice
- Výborná materiálová kompatibilita
- Plně virucidní účinek

### Oblast použití

Vhodný pro jednofázovou dezinfekci a čištění ploch a povrchů v nemocnicích, a také farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. **antifect® extra** je vhodný taktéž na dezinfekci močových nádob.

### Účinnost

Baktericidní, virucidní, tuberkulocidní, fungicidní  
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

### Návod na použití

**antifect® extra** se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve studené vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textílie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Nemíchejte s žádnými jinými dezinfekčními přípravky.



## Složení

100 g přípravku **antifect® extra** obsahuje následující aktivní látky:

- 9,8 g glutaraldehyd
- 5 g kvarterní amoniové sloučeniny (benzyl C-12-16-alkyldimethyl, chloridy)
- 5 g kvarterní amoniové sloučeniny (didecyldimethylammonium chloridy)

### Další složení:

5-15% neionogenní povrchově aktivní látky, parfémy

### Fyzikálně-chemické vlastnosti

|                     |   |
|---------------------|---|
| Barva               | zelený                                    |
| Dynamická viskozita | cca. 11 mPa*s / 20 °C / Metoda : ISO 3219 |
| Forma               | kapalný                                   |
| Hustota             | cca. 1,00 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C       |
| pH                  | cca. 4,7 / 20 °C / koncentrát             |
| Zápalná teplota     | 35 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1         |

## Zvláštní upozornění

Neskladujte při teplotách nad 30 °C. Mísení s jinými produkty může mít negativní vliv na účinnost produktu. Určeno pouze pro profesionální trh. Nesmí přijít do přímého kontaktu s potravinami. Při použití zajistěte větrání. Doba expirace: 24 měsíců

## Objednávkové informace

| Název produktu    | Balení    | Číslo výrobku |
|-------------------|-----------|---------------|
| Antifect extra 2l | 5/Karton  | 118302        |
| Antifect extra 5l | 1/Kanistr | 118305        |

## Související přípravky

- desam® GK

## Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

## Typ přípravku

Biocidní přípravek



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtete označení a informace o přípravku.



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

**Výrobce**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com