



## TESTOVACÍ BALÍČEK STERIKING® DCG2

Testovací balíčky **STERIKING®** slouží k provádění jednorázového vakuového testu sterilizátorů metodou Bowie&Dick. Ověřují prostup páry, kvalitu páry a výskyt netěsností komory. Jsou navrženy pro sledování kritických hodnot v testovacím programu Bowie-Dick.

### Shoda s mezinárodními standardy

Testovací balíčky **STERIKING®** vyhovují mezinárodním produktovým standardům ISO 11140-1:2014 (Typ 2 a 6) a ISO 11140-4:2007

Testovací balíčky **STERIKING®** jsou navrženy, validovány a vyrobeny tak, aby vyhovovali zamýšlenému použití.

### Technická data a charakteristika

Testovací balíčky **STERIKING®** jsou sestaveny ze schválených filtrů a netoxického indikačního listu. Produkt je také bez latexu.

Jsou určeny k dennímu testování vakuových parních sterilizátorů k potvrzení shody se standardem EN 285 a jako rutinní test provozu podle EN 554. Indikátor ukazuje jasnou barevnou změnu z bílé do černé po expozici suchou nasycenou párou při 134°C za 3,5 min. Podle 11140-4:2007.

### Skladování a životnost

Je doporučeno skladovat testovací balíčky **STERIKING®** v zavřených originálních krabicích, na suchém a čistém místě, chráněné před přímým slunečním světlem a vysokou vlhkostí.

Pokud je produkt skladován podle instrukcí, životnost balíčků je nejméně 3 roky od data výroby.

### Značení

Každý kartón má na sobě štítek s nezbytnými instrukcemi a informacemi o obsahu dle normy EN867-1:1997: popis produktu, identifikační kód, množství, číslo šarže, číslo výrobní dávky, datum výroby, datum doporučené spotřeby a doporučené skladovací podmínky.

### Prodejní a transportní balení

Testovací balíčky **STERIKING®** jsou baleny v recyklovatelné hnědé krabici z tvrdého kartonu, 20 kusů v kartonu.

Značení: Každá krabice nese štítek s nezbytnými informacemi / instrukcemi

Prosíme informujte o místních předpisech o nakládání s odpadem.

V případě reklamaace

Dodejte LOT číslo a kvůli zhodnocení produktu pošlete vadný vzorek (nebo digitální fotografii) a popis vady a také nepoužitý vzorek.

