



M A X T E R
GLOVE MANUFACTURING SDN BHD
(229862-H)

Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan
6th Miles Off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor, Malaysia
Tel: 603-33929888 (8 lines) Fax: 603-33923328
E-MAIL: maxter@tm.net.my
www.maxter.com.my

Datum vytvoření: 20. ledna 2020
IFU-POWDER FREE NITRILE



Nepudrované nitrilové vyšetřovací rukavice

Návod k použití

Rozměry

Velikost	XS	S	M	L	XL
Šířka	70-79 mm	80-89 mm	90-99 mm	100-109 mm	110-119 mm
Délka	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm

Popis

Rukavice jsou obouruké, nesterilní a vyrobeny ze 100% syntetické gumy. Jsou ošetřeny chlórem, aby se k sobě nelepily a bylo možné je jednoduše vytáhnout z krabičky.

Účel použití

Tyto rukavice jsou zdravotnickým prostředkem, který slouží k ochraně rukou. Hlavním účelem je ochrana rukou uživatele před kontaminací infekčním materiálem, viry, bakteriemi, krví a jinými tělními tekutinami. Jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Zamýšlené použití: lékařská vyšetření, stomatologická vyšetření, klinická vyšetření, diagnostické a terapeutické procedury, laboratorní účely

Jak rukavice používat

1. Příprava

- Zvolte rukavice správné velikosti.

2. Použití

- Před vytáhnutím rukavic si usušte ruce.
- Zkontrolujte, zda není krabička poškozena a rukavice vytáhněte.
- Rukavice z krabičky vytahujte jemně a opatrně.
- Zamezte kontaktu s ostrými předměty.
- Pro zamezení roztrhnutí rukavic udržujte své nehty zastřižené a rukavice často měňte.



M A X T E R
GLOVE MANUFACTURING SDN BHD
(229862-H)

Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan
6th Miles Off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor, Malaysia
Tel: 603-33929888 (8 lines) Fax: 603-33923328
E-MAIL: maxter@tm.net.my
www.maxter.com.my

Datum vytvoření: 20. ledna 2020
IFU-POWDER FREE NITRILE

Upozornění

1. Rukavice nepoužívejte opakovaně.
2. Použité rukavice uložte do příslušné nádoby na odpad a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.

Datum spotřeby

5 let od data výroby.

Skladování

1. Neotevřená i otevřená balení uchovávejte v suchu, chladu a nevystavujte je slunečnímu záření.
2. Nevystavujte je extrémnímu teplu. Teplota v místnosti nesmí překračovat 40 °C / 104 °F.
3. Uchovávejte v dostatečně větrané místnosti.
4. Nevystavuje přímému slunečnímu záření a fluorescenčnímu světlu.
5. Neuchovávejte v blízkosti zařízení, která produkují teplo či radioaktivní záření.



Maxter Glove Manufacturing Sdn Bhd
Adresa: Lot 6070, Jalan Haji Abdul
Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 603-33929888
Fax: 603-33923328



Supermax Healthcare (Europe)
Limited Address: 38 Main Street,
Swords, Co.
Dublin, Ireland K67
E0A2.



M A X T E R
GLOVE MANUFACTURING SDN BHD
(229862-H)

Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan
6th Miles Off Jalan Meru
41050 Klang, Selangor, Malaysia
Tel: 603-33929888 (8 lines) Fax: 603-33923328
E-MAIL: maxter@tm.net.my
www.maxter.com.my

Datum vytvoření: 20. ledna 2020
IFU-POWDER FREE NITRILE

Vysvětlivky symbolů

	Výrobce		Datum výroby
	Datum expirace		Označení šarže
	Zákaz opakovaného používání		Značka potvrzující splnění legislativních požadavků EU
XS, S, M, L, XL	Velikost		