

# NÁVOD K POUŽITÍ KE ZDRAVOTNICKÉMU PROSTŘEDKU:

## Transportní odběrová souprava

MTS-001, MTS-002, MTS-003, MTS-004

### Návod pro odběr vzorku:

- Soupravu otevřít v označeném místě na straně zátky zkumavky – roztažením folie a papíru
- Vyjmout zátku s tamponem a provést odběr materiálu
- Otevřít zkumavku s médiem otočením zátky, tím se přetrhne perforace na ochranném štítku zkumavky. **POZOR!** Zátka ze zkumavky nikdy nevytlamujeme!
- Tampon s odebraným materiálem vsunout do zkumavky s médiem a zátku dobře zatlačit!
- Takto provedený odběr označit a odeslat do laboratoře.

### Účel použití:

- Transportní odběrová souprava pro mikrobiologii slouží k neinvazivnímu odběru biologického materiálu formou výtěru z úst, krku, nosu, oka, ucha a rekta a následnému transportu vzorku do laboratoře za účelem mikrobiologické diagnostiky.

### Skladování:

- Skladujte při teplotě 5-30°C, v suchu, ne na slunci
- Obsah soupravy je sterilní a lze jej použít, pokud není obal poškozen
- Zdravotnický prostředek slouží pro jednorázové použití
- 

V případě zjištění jakékoliv závady volejte na **519 325 460**

**Výrobce:**  
**Med-Lab trade s.r.o**  
Hlavní 426  
691 25 Vranovice  
IČO: 25509586  
DIČ: CZ25509586

**Společnost je držitelem certifikátu:**  
ISO 9001:2009  
ISO 13 485:2012

[www.medlab.cz](http://www.medlab.cz)



Vydáno ve Vranovicích dne 12.1.2016