

Gem Grid tape (Mřížkový tejp)

IDEÁLNÍ POMOC PŘI BOLESTECH, SPORTU, REGENERACI aj.....
.... bez léků!!!

1. Složení Gem Grid tape.
 2. Video návody - aplikace Gem Grid tape
 3. Příprava, aplikace a odstranění pásky
 4. Příklady jak nalepit Gem Grid tape...
 5. Kontraindikace
-

1. Gem Grid tape je páska ve tvaru mřížky, vyrobená z hedvábí, je hypoalergenní.

Páska neobsahuje latex, je prodyšná a voděodolná.

S Gem Grid tape lze bez omezení: se sprchovat, navštívit saunu, sportovat, plavat, pracovat.....

Lepící plocha - lepidlo pásky obsahuje lékařskou pryskyřici bez přidaných látek. Neobsahuje latex a je hypoalergenní.

2. Aplikaci Gem Grid tape lze aplikovat v pohodlí domova za pomoci video návodů a praktických rad dostupných na www.gemmedical.cz

Gem Grid tape se aplikuje na tzv. spoušťové body, akupunkturální body, bolestivé body... Tyto mřížkové tejpů redukuje bolest, napomáhají dobré krevní a lymfo cirkulaci, otoky či hematomy rychleji ustupují. Umocňují vlastní sílu uzdravení těla.

3. Pro snadné sejmutí Gem Grid tape je nosný papír nařezán, stačí odehnout a mřížkový tejp sejmut z nosného papíru.....

Gem Grid tape nalepujte pouze na suchou, čistou kůži bez ochlupení. Po osprchování se, nalepenou pásku důkladně vysušte přikládáním ručníku, netřete ručníkem po pásce....

Gem Grid tape odstraňujte opatrně, abyste si neporanili kůži!
Pásku lze komfortněji odstranit ve sprše, pod vodou nebo pásku potřít mastnou tekutinou - olejem. Gem Grid tape odstraňte po odeznění problémů, max. po 7 dnech.

4. Příklady jak nalepit Gem Grid tape:

	<p><u>Aplikace při:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- bolesti po obvodu hlavy- bolesti na spáncích, na čele... <p>(pocit „hlava ve svěráku“)</p> <ul style="list-style-type: none">- bolesti temene a šíje- bolest při předklonu a záklonu hlavy
	<p><u>Aplikace při:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- bolest Achillovy šlachy- citlivost paty na dotek- potíže při chůzi do kopce- potíže při chůzi nahoru a dolu po schodech....

více na www.gemmedical.cz

5. Kontraindikace: - neobjasněné potíže, - tenká, ochablá, citlivá kůže, - podrážděná kůže (začervenání, pupínky), - porušená integrita kůže....

Při přecitlivělosti kůže doporučujeme vyzkoušet Gem Grid tape na vnitřní straně předloktí....

V případě dotazů pište na email info@gemmedical.cz anebo navštivte webové stránky pro získání dalších informací...
Pokud problémy neodezní anebo se stav zhorší, obraťte se na odborníka.....

Krásné dny, plné fyzió úlevy od bolesti!!!