

05/06/2020

INFORMAČNÍ LETÁK

Vyrobeno:
PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN. BHD.
Lot 5322, 15th Miles, Jalan Padang Gajah,
45800 Jeram, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: 603-3250 0377 ; Fax: 603-3250 3069
Website: www.plp.com.my

CE
0482



Obelis s.a.
Boulevard Général Wahis 53,
1030 Brussels, BELGIUM.
Tel : +(32) 2.732.59.54
E-mail : mail@obelis.net

Znak

Definice



Použijte do data spotřeby



Datum výroby



Uchovávejte v suchu



Nevystavujte slunečnímu záření



Jednorázové použití



Šarže nebo výrobní kód



Obsahuje přírodní latex



Nepoužívejte, pokud je balení poškozené



Přečtěte si návod k použití



Výrobce



Nesterilní

Upozornění pro uživatele: Jakoukoliv nežádoucí příhodu hlase výrobcí, popř. autorizovanému zástupci a kompetentnímu kontrolnímu úřadu v ČR.

NÁVOD K POUŽITÍ OCHRAN VAGINÁLNÍCH SOND

Datum vystavení: 18-Feb-2020 (revize 03)

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD

KOMU JE URČENO

- Pouze pro zdravotnický personál.

ÚČEL POUŽITÍ

- Ochrana vaginální sondy předchází kontaminaci sondy tělními tekutinami. Uspodňuje čištění a dezinfekci sond.
Určeno pouze k jednorázovému použití.

INDIKACE POUŽITÍ

- Tyto ochrany vaginálních sond (obecně známé jako ochrana sondy) jsou definovány jako příslušenství k ultrazvukové sondě Ultrasonického zobrazovacího systému. Pro zajištění správného používání ochrany sondy společně s ultrazvukovou sondou je nezbytné před použitím přečíst návod anebo se seznámit s odkazy v manuálech sondy.
- Jestliže je gumový materiál lepkavý, křehký nebo zjevně poškozený, nepoužívejte jej.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Zkontrolujte, zda je datum expirace aktuální.
- Otevřete balení sond jemným a opatrným odtržením.
- Ujistěte se, že rolovaná část ochrany je na zevní straně.
- Nasaďte ochranu na hlavu sondy a srolujte jemně až na konec sondy.
- Jestliže je potřebná lubrikace, nepoužívejte společně s ochranou z přírodního latexu lubrikanty na bázi oleje, může dojít k poškození ochrany vaginální sondy. Používejte lubrikanty na bázi vody.
- Pouze pro jednorázové použití

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte v chladném, suchém místě bez přímého slunečního záření.

LIKVIDACE

- Použité ochrany sondy zlikvidujte podle nařízení o nakládání s odpady.

**UPOZORNĚNÍ: TYTO OCHRANY VAGINÁLNÍCH SOND
OBSAHUJÍ PŘÍRODNÍ LATEX, KTERÝ
MŮŽE ZPŮSOBIT ALERGICKOU REAKCI
VČETNĚ ANAFYLAKTICKÉHO ŠOKU.**