

# Návod k použití

## Jednorázové gynekologické zrcadlo

### **Specifikace:**

L, M, S, XS, XXS

### **MFG A EXP:**

Viz pečeť obalu

Jednorázové gynekologické zrcadlo se skládá z vrchní/spodní čelisti a rukojeti. Je vyrobeno z polystyrenu a polypropylenu. Sterilizováno ethylenoxidem, zbytky ethylenoxidu by neměly být vyšší než 10 mu/g.

### **Zamýšlené použití**

Pro gynekologické vyšetření

### **Způsob aplikace**

Před použitím zkontrolujte, zda je obal neporušen. Podél perforace obal roztrhněte. Zrcadlo vyjměte z obalu. Čelisti zrcadla ponechte uzavřeny, vložte do vagíny a čelisti rozevřete dle potřeby.

### **Kontraindikace**

Bez kontraindikací











### **Přeprava a skladování**

1. Výrobek nesmí být vystaven velkému zatížení, přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu a pobytu v blízkosti toxických látek.
2. Výrobek musí být skladován v chladném, suchém, dobře větraném, čistém prostředí při relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %.

### **Upozornění**

1. Používat pouze v přísném souladu s normami zachování sterility.
2. Výrobek je sterilní po dobu pěti let od data výroby. Používání výrobku po datu expirace je přísně zakázáno.
3. Výrobek nepoužívejte, pokud je obal poškozen.
4. Výrobek je určen výhradně k jednorázovému použití. Opakované používání není možné a je přísně zakázáno.

## Vysvětlivky

				
Chraňte před deštěm	Chraňte před slunečním zářením	Přečtěte návod k použití	Šarže	Datum výroby
				
Pouze jednorázové použití	Expirace	Sterilní	Sterilizováno plynem EO	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen



**CHANGZHOU HUANKANG MEDICAL DEVICE CO., LTD**

Add: 22 Changhe Road Sanhekou, Zhenglu,  
Changzhou, Jiangsu, Čína

Telefon: +86-519-88909800, Fax: +86-519-88906900



**SUNGO Europe B.V.**

Olympisch Stadion 24, 1076DE

Amsterdam, Netherlands

Tel/Fax: +31(0)2021-11106

