

GUTTASOLV

Přípravek pro rozpouštění gutaperčových uzávěrů

Složení:

eukalyptol

Vlastnosti:

Přípravek pro rozpouštění gutaperčových uzávěrů

Indikace:

Usazení primárního gutaperčového čepu v technice kořenových výplní pomocí laterální kondenzační metody. Opětovná léčba pro výplni kořenového kanálku pomocí kondenzace gutaperči.

Návod k použití:

- Umístění primárního čepu (laterální kondenzace):
Při usazování primárního čepu roztok změkčuje jeho povrch, a tak usnadňuje jeho adaptaci k nepravidelným stěnám a okrajům kořenového kanálku. Nejdříve lékař vybere primární čep, s ohledem na typ a velikost kořenového kanálku. Apikální špičku čepu namočte do roztoku. Vložte čep do kanálku celou svou délkou, při vsunování čepem pohybujte nahoru a dolů. Čep poté z kanálku vytáhněte – je pokryt cementem. Poté jej opět vsuňte, jako byste pumpovali, cement se tak dostane až k apexu. Na závěr, pomocí spreaderu (kořen.nástroje) navlhčeného roztokem, čep laterálně kondenzujte.
- Opětovná léčba
Do pulpy vkápněte dvě kapky. Poté pomocí ručního kořenového nástroje odstraňte změkklou gutaperču dokud nástroj nedosáhne apikálního otvoru. Občas přidejte čerstvý roztok a alternativně propláchněte chlormanem sodným.

Důležité upozornění:

Roztok je hořlavina. Skladujte v bezpečné vzdálenosti od zdroje ohně. Nekuřte. Nepolykejte.

Balení:

Roztok pro dentální použití

Lahvička 15ml

Skladování:

Składujte při pokojové teplotě v originální lahvičce, na tmavém a suchém místě.

Farmako-terapeutické zařazení:

Dentální produkt pro profesní použití

Výrobce:

Septodont, Francie