

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski  
ul . E.Kwiatkowskiego 1  
37 - 450 Stalowa Wola  
POLAND

## BLUE ETCH

### DENTÁLNÍ LEPTACÍ GEL

#### BALENÍ:

2 ml tixotropního gelu (modré barvy) obsahujícího 36% kyselinu ortofosforečnou v jednorázové injekční stříkačce, sada aplikátorů

#### INDIKACE:

Leptací gel se používá k leptání dentinu a skloviny před použitím kompozitních materiálů, pečidel na fisury a kavity.

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

Na vysušený povrch aplikujte tenkou vrstvu leptacího gelu BLUE ETCH. Nechejte působit maximálně 60 sekund. Důkladně vypláchněte vodou (15 – 20 sekund) a vysušte vzduchem. Ponechejte povrch mírně vlhký. V případě znečištění skloviny postup opakujte.

#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při použití leptacího gelu BLUE ETCH doporučujeme používat ochranné pomůcky obličeje a očí. Zamezte styku s očima a kůží. Při zasažení vypláchněte velkým množstvím vlažné vody. Při podráždění očí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek lze používat opakovaně, aplikátory jsou však určeny na jedno použití. Použitý obal nebo látku s obalem vraťte výrobci nebo předejte autorizovanému odběrateli chemického odpadu.

**PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE K DENTÁLNÍMU POUŽITÍ**