



**Alkoholové  
ubrousky**

Dezinfekční ubrousky napuštěné alkoholovým roztokem určené pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků otěrem.

## mikroqid® AF wipes

### Naše plus:

- Jednoduchá manipulace a snadné použití
- Rychlý a razantní dezinfekční efekt
- Okamžitě k použití
- Dobrá materiálová snášenlivost

### Oblast použití:

**mikroqid® AF wipes** se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:

- Povrchy v blízkosti pacientů
- Kontaktní plochy
- Vyšetřovny
- Operační stoly a okolní povrchy
- Zdravotnické prostředky

### Návod na použití:

Předem odstraňte z povrchu nebo předmětu viditelné nečistoty. Vytáhněte ubrousek z plastické dózy a stírejte dezinfikovaný povrch. Dbejte na důkladné smočení povrchu. Nechejte zaschnout. Používejte pouze na suché a studené povrchy. Pro dezinfekci větších ploch použijte více ubrousků. Po použití dózu důkladně uzavřete.

### Doporučená doba expozice:

1 min nebo do zaschnutí

### Spektrum účinnosti:

Baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní

Účinnost	Norma	Expozice
Baktericidní	EN 13727, EN 13697 <sup>2</sup>	1 min.
MRSA	DGHM <sup>2</sup>	1 min.
Levurocidní (C. albicans)	EN 13624 <sup>2</sup>	1 min.
Fungicidní (C. albicans, A. niger)	EN 13697 <sup>2</sup>	1 min.
Virucidní (BVDV/ Vaccinia/ Rota)	DVV/RKI <sup>2</sup>	30 s
Virucidní (Noro)	DVV/RKI <sup>2</sup>	1 min.
Virucidní (Adeno)	DVV/RKI <sup>2</sup>	5 min.
Virucidní (Polyoma SV40)	DVV/RKI <sup>2</sup>	10 min.
Mykobaktericidní (M. avium, M. terrae)	EN 14348 <sup>2</sup>	1 min.

Testováno ve vyšší zátěži

# mikrozid® AF wipes

## Složení:

100 g roztoku mikrozid® AF wipes obsahuje následující aktivní látky:

- 35 g Propal-1-ol
- 25 g Ethanol

## Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled	ubrousky napuštěné bezbarvou kapalinou
hustota	cca. 0,85 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
hodnota pH	cca. 20 / 20 °C

## Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické nástroje použijte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Teplota skladování: -20 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy). Po otevření výrobce garantuje účinnost po dobu 3 měsíců. Po použití dózu vždy těsně uzavřete.

## Logistické informace:

Název produktu	Velikost balení	Ks v kartonu
mikrozid® AF wipes	Dóza 150 ubrousků, rozměr ubrousku 18x14 cm	10
	Náhradní náplň 150 ubrousků, rozměr ubrousku 18x14 cm	20
	Dóza Jumbo 200 ks ubrousků	10
	Náhradní náplň Jumbo 200 ks ubrousků	12

## Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

## Doba expirace:

30 měsíců

## Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIa [CE 0297]



Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.

**Air Liquide** HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

## Další informace:

Navštivte webové stránky:  
[www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)

## Výrobce:

**Schülke & Mayr GmbH**  
Robert Koch Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0  
+49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

## Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894  
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368  
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808  
e-mail: [schulkecz@schuelke.com](mailto:schulkecz@schuelke.com)

## Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: + 420 558 320 260  
[www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)  
[schulkecz@schuelke.com](mailto:schulkecz@schuelke.com)

## Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.  
Moštenická 3  
971 01 Prievidza  
Slovenská republika  
tel.: +421 465 494 587  
[www.schulke.sk](http://www.schulke.sk)