



Na citlivé  
povrchy

Dezinfekční utěrky napuštěné roztokem na bázi kvarterních amoniových sloučenin, určené k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Vhodné na dezinfekci povrchů a předmětů, a to především z materiálů citlivých na alkohol.

## mikroqid<sup>®</sup> sensitive wipes

### Naše plus:

- Vhodné na citlivé povrchy
- Okamžitě k použití
- Zaručují rychlý dezinfekční efekt – již od 1 minuty
- Pohodlné a snadné použití

### Oblast použití:

**mikroqid<sup>®</sup> sensitive wipes** se doporučují k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště jsou vhodné pro dezinfekci povrchů citlivých na alkohol. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např.:

- Povrchy v blízkosti pacientů
- Kontaktní plochy
- Vyšetřovny
- Plastové a akrylátové povrchy
- UZV sondy
- Klávesnice

### Návod na použití:

**mikroqid<sup>®</sup> sensitive wipes** se používají na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. Vyměte z dózy potřebný počet ubrousků a otírejte jimi povrchy určené k dezinfekci; dbejte přitom na důkladné smočení povrchů. Kryt dózy uzavřete bezprostředně po vytažení potřebného množství ubrousků.

Výrobce garantuje životnost produktu po otevření po dobu 3 měsíců.

### Účinnost:

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Noro / Rota / Polyoma SV40, mykobaktericidní, tuberkulocidní

Účinnost	Norma	Doba expozice
Baktericidní	EN 13727, DGHM	1 min.
MRSA, ESBL	DGHM	1 min.
Levurocidní (C. albicans)	EN 13624, DGHM	1 min.
Virucidní (BVDV/Vaccinia/Rota/Polyoma SV40)	DVV/RKI	1 min.
Virucidní (Noro)	DVV/RKI	15 min.
Tuberkulocidní (M. terrae)	EN 14348	60 min.
Mykobaktericidní (M. avium, M. terrae)	EN 14348	60 min.

# mikrozyd® sensitive wipes

## Složení:

100 g roztoku mikrozyd® sensitive wipes obsahuje následující aktivní látky:

- 0,26 g Kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy
- 0,26 g Kvarterní amoniové sloučeniny, didecylmethylammonium chlorid
- 0,26 g Kvarterní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimehtyl, chloridy

## Fyzikálně-chemické vlastnosti:

roztok	
vzhled	ubrousky napuštěné bezbarvou kapalinou
hustota	cca. 1 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
hodnota pH	cca. 6–8 / 20 °C

## Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Po použití dózy vždy těsně uzavřete. Chraňte před horkem a slunečním světlem. Používejte ochranné rukavice.

## Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
mikrozyd® sensitive wipes	dóza Jumbo 200 ks utěrek (rozměr utěrek 20x20 cm)	10
	náhradní náplň Jumbo 200 ks utěrek Premium wipes sáček 48 ks	12

## Doba expirace:

24 měsíců

## Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIa [CE 0297]

## Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.



Součást skupiny Air Liquide.

## Další informace:

Navštivte webové stránky:

[www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)

## Výrobce:

**Schülke & Mayr GmbH**  
Rober-Koch Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0  
+49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

## Pro individuální dotazy a požadavky:

**Produktový manažer:** +420 725 835 047  
**Area Sales manažer ČR:** tel.: +420 724 013 101  
**Manažer pro distributory ČR:** tel.: +420 724 176 368  
**Area Sales manažer SR:** tel.: +421 911 288 808  
**Manažer pro distributory SR:** tel.: +421 903 262 932

## Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 326  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: + 420 558 320 260  
[www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)  
[schulkecz@schuelke.com](mailto:schulkecz@schuelke.com)

## Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.  
Moštenická 3  
971 01 Prievidza  
Slovenská republika  
tel.: +421 465 494 587  
[www.schulke.sk](http://www.schulke.sk)