



MODERNÍ,
SPOLEHLIVÁ
DEZINFEKCE

CE
1023

DESAM® OX

KONCENTROVANÝ KAPALNÝ DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK NA BÁZI AKTIVNÍHO KYSLÍKU

- Pro účinné mytí a dezinfekci ploch a povrchů zdravotnických prostředků
- Vhodný pro každodenní dezinfekci i za přítomnosti pacientů
- Všestranný, účinný a ekonomický - 1% 15 min
- Šetrný k dezinfikovaným materiálům
- Dezinfekce bez nepříjemného zápachu a dráždení

DESAM[®] OX

Koncentrovaný dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku aktivního kyslíku a KAS, vhodný pro dezinfekci ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Určen pro jednofázovou dezinfekci a mytí omyvatelných ploch a předmětů ve všech prostorách zdravotnictví. Vhodný na všechny neporézní, voděodolné, omyvatelné plochy a předměty. Přípravek lze použít i za přítomnosti pacientů (např. ARO, JIP, novorozenecká oddělení, atd.). Mimořádně vhodný také k dezinfekci povrchů v balneoprovozech, na rehabilitacích, dezinfekci vodoléčebných van a k prostrídání aktivních látek s přípravkem Desam Effekt a Desam Extra. Možné použití v kombinaci se systémem utěrek a kbelíku Wettask.

Složení:

Aktivní látky:

- Peroxid vodíku
- Kvarterní amoniové sloučeniny

Spektrum účinnosti:

- Baktericidní, MRSA, virucidní (*BVDV, Vaccinia, Rotavirus, Adenovirus*), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní (*Cl. Difficile*)

Použití	Koncentrace	Expozice	Spektrum	
Čištění a dezinfekce ploch a povrchů zdravotnických prostředků	1%	15 min	A(B)V	
Čištění a dezinfekce při zvýšené biologické zátěži	1%	30 min	A(B)TMV	
Účinnost	Testovací norma	Koncentrace	Expozice	
Baktericidní	<i>S. Aureus, P. Aeruginosa, E. Hirae</i>	EN 13727	1%	15 min
	MRSA	SOP	0,5%	2 min
Fungicidní	<i>C. Albicans, A. Niger</i>	EN 13624	1%	15 min
Mykobaktericidní	<i>M. Avium, M. Terrae</i>	EN 14348	1%	30 min
Virucidní	<i>BVDV, Vaccinia</i>	EN 14476	1%	15 min
	<i>Rotavirus</i>	DVV/RKI	2%	5 min
	<i>Adenovirus</i>	EN 14476	5%	60 min
Sporicidní	<i>Cl. Difficile</i>	EN 14347	5%	30 min

Návod na použití:

Příprava pracovního roztoku: 1% roztok se připraví rozmícháním 10 ml přípravku v 990 ml vody o teplotě 20 - 25 °C.

Logistické údaje:

EAN kód	Název výrobku	Obsah	Počet ks v kartonu	Počet ks na paletě
8594005390836	Desam OX	1 l	12	324
8594005390959	Desam OX	5 l	x	96

Dezinfekce ploch a předmětů: Z ploch a předmětů předem odstraňte hrubé nečistoty. Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé, voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Pracovní roztok lze na menší plochy a předměty aplikovat i postříkem s pěnovým aplikátorem.

Oblast použití:

- Ke každodenní dezinfekci ve všech prostorách zdravotnických zařízení (pooperační, porodnická, novorozenecká, diagnostická, plicní, oční oddělení, operační sály, JIP, ARO a dialyzační jednotka, fyzioterapie, vodoléčba, rehabilitace, LDN) a v obecné praxi.
- Určen na všechny voděodolné a omyvatelné povrchy a předměty kromě pozinkovaných povrchů, kůže a neošetřeného dřeva, barevně nestabilních, poréznych materiálů a mechanicky poškozených povrchů.

Balení:

- 1 l láhev,
- 5 kg kanystr

Expirace:

- 24 měsíců

Typ přípravku:

- Zdravotnický prostředek

Aplikační pomůcky:

Dávkovací pumpa pro 5 kg kanystry, odměrka pro tekuté dezinfekční prostředky, mixážní stanice pro tekutou dezinfekci.



Výrobce:

BOCHEMIE a.s., Lidická 326, CZ – 735 95 Bohumín, tel.: 596 091 111, www.bochemie.cz
• manažer pro prodej ČR: mob: + 420 724 013 101 • manažer pro prodej SR: +421 903 262 932
Manažer pro distributory ČR+SR:+420 724 176 368 • Produktový manažer ČR+SR: +420 724 913 393

