

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

GLUCO-CHeX 2%

Tekutina pro výplach kořenových kanálků

PRODUKT POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ

Složení : chlorhexidin diglukonát, voda Ph. Eur.

Balení :

láhev o hmotnosti 200 g

Zamýšlené použití

Tekutina se používá pro výplach kořenových kanálků, aby se odstranily nečistoty.

Zlepšuje přípravu kořenových kanálků.

Produkt lubrikuje kořenové kanálky během mechanické přípravy.

Adaptér se zátkou pro nasátí tekutých přípravků do stříkačky

1. Odšroubujte uzávěr láhve.

2. Umístěte adaptér na hrdlo láhve a pevně stlačte.

3. Abyste mohli láhev použít, odstraňte modrou zátku, našroubujte konec injekční stříkačky na otvor adaptéru, obraťte láhev s přípravkem vzhůru nohama a nasajte tekutinu do stříkačky, zatímco držíte adaptér. Pak položte láhev na stůl ve vzpřímené poloze a opatrně odšroubujte injekční stříkačku od adaptéru. Doporučuje se používat stříkačku se závitem Luer Lock a gumovým pístem.

4. Po každém použití uzavřete otvor adaptéru modrou zátkou.

5. Při převozu odstraňte adaptér a láhev řádně uzavřete víčkem.

Pokyny pro použití

Během mechanické přípravy za pomoci injekční stříkačky s jehlou s bočním vstupem vstříkněte tekutinu do kořenového kanálku . Vydatně kanálky propláchněte, přibližně 10 ml na jeden kanálek.

Nežádoucí účinky

Nepoužívejte produkt u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku.

Varování

Výrobek může způsobovat podráždění sliznice dutiny ústní. V případě kontaktu vypláchněte okamžitě vodou. V případě požití vypijte dostatečné množství vody. Nevyvolávejte zvracení.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při práci s výrobkem je nezbytné použít rubber-dam. Doporučuje se také použití ochranných pomůcek (brýle, ochranné plexisklo, rukavice).

VAROVÁNÍ! Při proplachování kořenových kanálků je nezbytné vypláchnout fyziologickým roztokem mezi použitím chlornanu sodného a chlorhexidin glukonátu. Zabraňuje srážení žlutohnědých usazenin. Hodně vyplachujte.

Skladování

Chraňte výrobek před slunečním světlem.

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

Udržujte mimo dosah dětí.
Prázdné obaly by měly být zlikvidovány zodpovědně.
Nepoužívejte produkt po datu expirace vyznačeném na obalu.
Skladujte v původním obalu při teplotě do 25 °C.